



GE Entropie Sensor und GE Entropie Kabel

Für die Überwachung der Auswirkungen bestimmter Anästhetika auf das zentrale Nervensystem des Patienten während der Allgemeinanästhesie.

Bei dem einmal verwendbaren GE Entropie Sensor und dem wiederverwendbaren GE Entropie Kabel handelt es sich um Zubehörkomponenten für die Entropie-Messung mit dem GE Entropy™-Modul. Der Sensor dient für die Abnahme der EEG- (Elektroenzephalographie) und FEMG-Signale (Frontalis-Elektromyographie), aus denen das Entropie-Modul die beiden Entropie-Parameter – State-Entropy und Response-Entropy – berechnet. Der GE Entropie Sensor eignet sich für Erwachsene und für Kinder ab zwei Jahren.

Der GE Entropie Sensor ist vorwärts- und rückwärtskompatibel mit allen GE Entropy-Modulen.

Eigenschaften

- Nur ein Stecker – ergonomisch und anwendungsfreundlich
- Geringe und stabile Impedanz – gute Signalqualität
- Feucht-Gel-Elektroden – maximaler Patientenkomfort
- Flexible Anschlusskabel – flexible Positionierung des Sensors



GE Entropie Sensor und GE Entropie Kabel

Technische Daten des GE Entropie Sensors

- Einmalprodukt
- Drei flexible Anschlusskabel / ein Stecker
- Für Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren
- Weiche Feucht-Gel-Elektroden
- Hautpräparation erforderlich
- Für die Verwendung mit dem GE Entropie Kabel
- Unbedenkliche Anwendung auch bei Elektrochirurgie und Defibrillation
- Maximale Nutzungsdauer: 24 Stunden
- Maximale Lagerungsdauer: 12 Monate

Wartung

Der GE Entropie Sensor ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen und darf nicht wieder verwendet werden.

Das GE Entropie Kabel kann mit einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel abgewischt werden. Eine Sterilisierung mit Äthylenoxid oder Gasplasma (STERRAD) ist ebenfalls zulässig.

Hinweis: Detaillierte Anweisungen zur Verwendung sind der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Bestellinformationen

Beschreibung	Bestellnummer
GE Entropie Sensor (25 Stück/Packung)	M1038681
GE Entropie Kabel, 3,5 m (1 Stück/Packung)	M1050784
GE Entropie Startup-Kit:	M1060609
GE Entropie Sensor (2 Packungen)	
GE Entropie Kabel (1 Stück)	



Deutschland

Munzinger Str. 3
79111 Freiburg
T: +49 761 4543 0
F: +49 761 4543 233

GE Healthcare Service Center
T: 0800 4343258
T: 0800 GEHealthcare

© 2006 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.
GE und GE Monogram sind Marken der General Electric Company.

Entropy ist eine Marke von GE Healthcare Finland Oy.

GE Healthcare Finland Oy, ein Unternehmen der General Electric Unternehmensgruppe, wird unter dem Namen GE Healthcare geführt.

GE Healthcare

P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finnland

Tel.: +358 10 394 11 • Fax: +358 9 146 3310

www.gehealthcare.com



GE imagination at work