

クイックガイド

(Invenia ABUS スキャンステーション編)

- はじめに
- 基本構成
- スキャンステーションの起動
- 検査の準備
- タブについて
- 患者情報の登録とプロトコルの選択
- 患者情報の登録 - ワークリストの場合
- 検査の注意
- 被験者の体位について
- ローション・超音波ゲルの塗布
- 関節型アーム・スキャナーアッセンブリーの調整
- スキャンビュー
- 深度の選択
- 圧迫方法
- 画像の収集
- スタートストップスキャン
- ロック/アンロックの切替
- 画像収集後の操作
- Verify
- 検査の転送確認と再送方法
- 終了操作
- 定期メンテナンス



はじめに

- 製品の安全使用のため、同梱されているベーシックユーザーマニュアルと添付文書を併せてご覧ください。
- 本クイックガイドは、製品の基本操作の一部を簡単にまとめたものです。
- 本クイックガイドは、頻繁に使用されると仮定された項目のみについて説明されています。

ご不明な点は弊社担当者へお問い合わせください。

基本構成



スキャンステーションの起動

1. 本体背面にあるブレーカーをオンにしてください。
2. 主電源スイッチを押してください。


ブレーカー




主電源スイッチ

3. 電源起動後 ログインウィンドウを表示します。
 ユーザーネームのカラムをタッチすると 登録済みのユーザーネームをウィンドウに表示します。タッチで選択して下さい。
 パスワードのカラムをタッチすると キーボードが表示します。
 パスワード入力後 ログイン  を押して下さい。

ユーザーネーム例

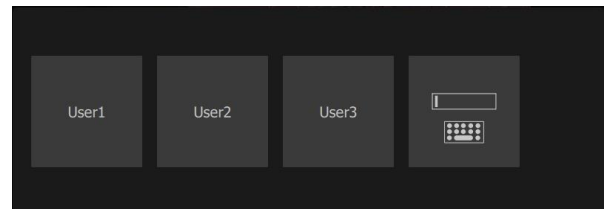

パスワード入力のキーボード表示

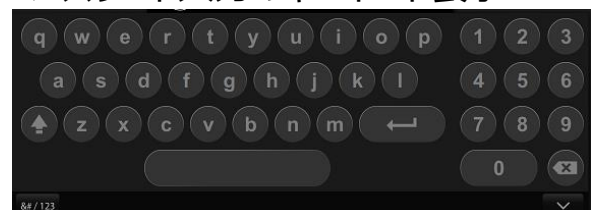

検査の準備

- 適切な圧迫を行う為に 51センチ以上の高さの検査ベットを使用して下さい。
- スキャンステーションの関節型アームに圧迫を示す矢印があります。
適切な圧迫を行うために 矢印が見えている状態でご使用下さい。
矢印が見えていない場合、適切な圧迫が出来なくなります。



- メンブレン
メンブレンはディスポーザブルです。検査毎に交換し廃棄して下さい。
破れなど損傷がある場合は 使用しないで下さい。
スキャナーアッセンブリーのトランスデューサーとメンブレンだけが、
患者さんに直接接触する部分です。

