

クイックガイド




(Invenia ABUS スキャンステーション編)

- はじめに
- 基本構成
- スキャンステーションの起動
- 検査の準備
- タブについて
- 患者情報の登録とプロトコルの選択
- 患者情報の登録 - ワークリストの場合
- 検査の注意
- 被験者の体位について
- ローション・超音波ゲルの塗布
- 関節型アーム・スキャナーアッセンブリーの調整
- スキャンビュー
- 深度の選択
- 圧迫方法
- 画像の収集
- スタートストップスキャン
- ロック/アンロックの切替
- 画像収集後の操作
- Verify
- 検査の転送確認と再送方法
- 終了操作
- 定期メンテナンス



タブについて

スキャンステーションは簡単に操作出来る様にデザインされています。
画面下部の名称部分を押すとタブを切り替えることができます。

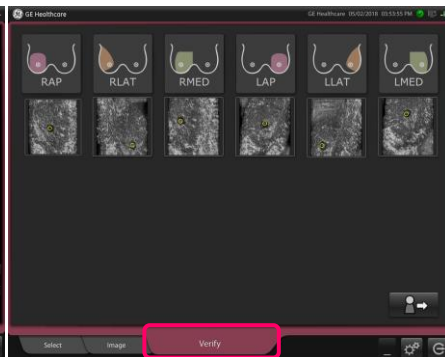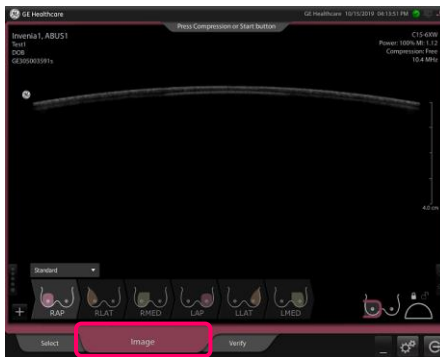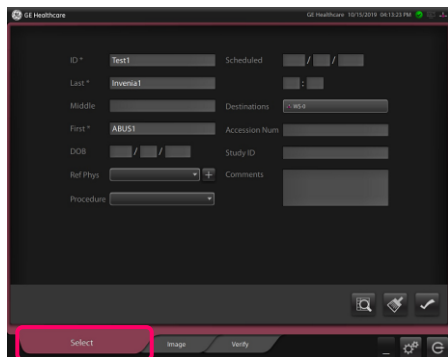


患者情報の登録とプロトコルの選択

1. “Select” タブで 患者情報を登録して下さい。
 * マークの3項目：ID・Last(姓)・First(名)が入力必須項目です。
 他の項目は必要に応じて入力して下さい。

2. 患者情報入力後、画面右下の  を押して下さい。

Imageタブに移動し、入力した患者情報をタッチスクリーン左上に表示します。

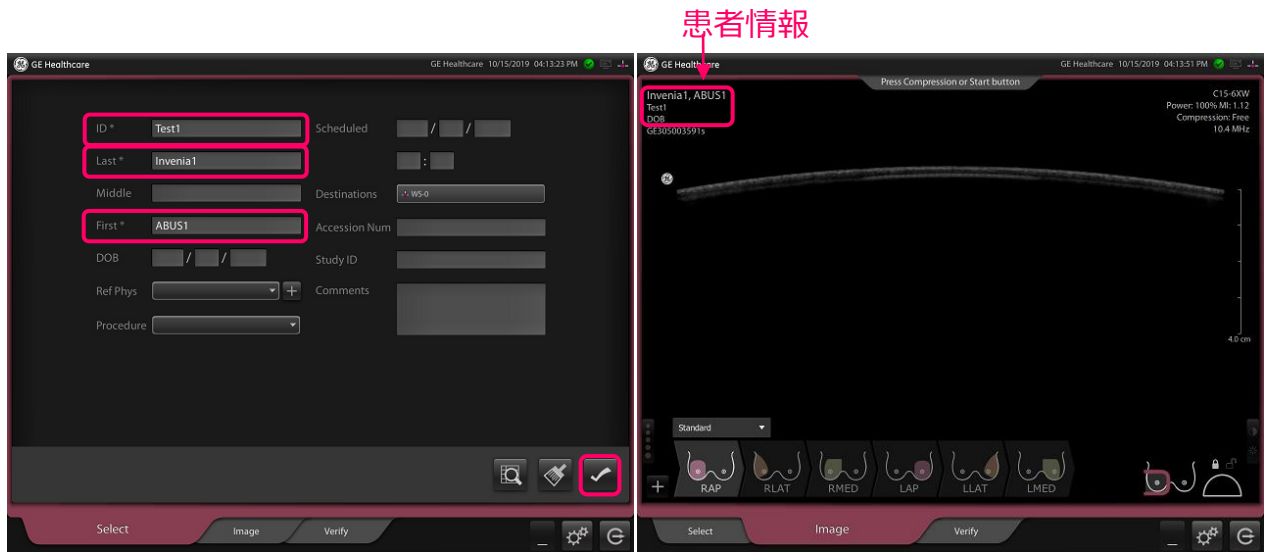


患者情報の登録：ワークリストの場合

ワークリスト使用時、設定によりワークリスト画面 または 患者追加登録画面の表示が可能です。設定については 弊社担当者にお問い合わせください。


ワークリスト画面表示の場合

1. ワークリストから 対象の患者をタッチするとピンクにハイライトします。
 2. 画面右下の  を押して下さい。
Imageタブに移ります。
- ワークリストの更新：
 を押すと、ワークリストの更新を行います。

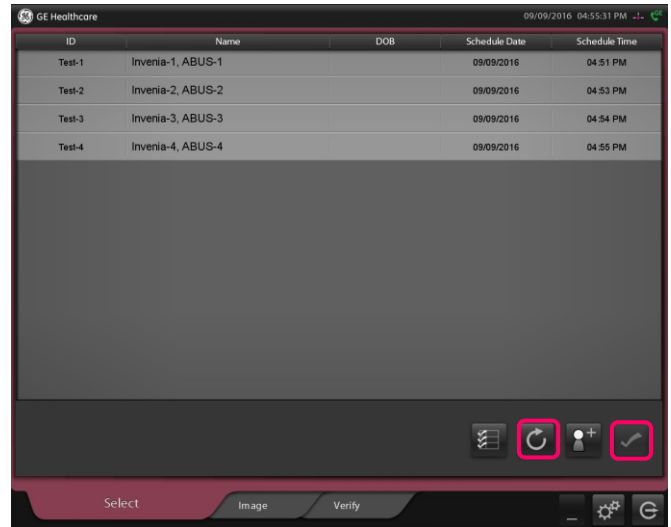

患者追加登録画面表示の場合

1. ID・Last(姓)・First(名)を入力後  を押して下さい。
2. ワークリスト画面が表示します。
追加登録した患者情報も表示されます。対象の検査を選択後、画面右下の  を選択して下さい。
Imageタブに移ります。

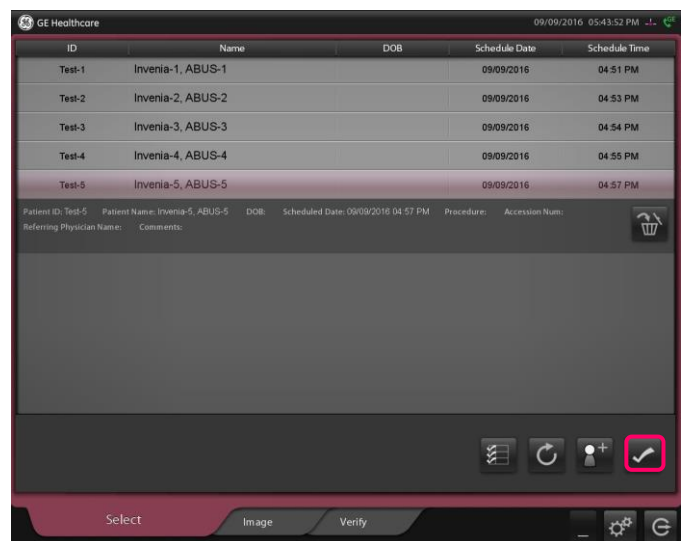

ワークリスト画面で画面右下の  を選択すると 患者追加登録が可能です。
患者追加登録画面表示後の手順は 上記 患者情報追加登録画面表示の場合と同様です。

検査の注意

Invenia ABUSでは、以下の症例の検査は禁忌です。

- 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器等を留置されている方
- ニップルピアス装着の方