

画像の静止/保存の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本
操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付さ
れている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1



記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

画像の静止/保存の手順



画面の静止

【Freeze】ボタンを押すと画面が静止します。

静止画保存

【P1】【P2/3/4】で保存/プリントが可能です。

* 設定により異なります。

1. 本体ハードディスクに画像保存
2. 白黒プリンタ
3. カラープリンタ
4. ネットワーク 画像転送

動画画保存

【Freeze】ボタンを押さずに、保存ボタンを押すと動画が保存されます。

* 設定で保存の秒数を変更できます。