

検査終了の手順




このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本
操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付さ
れている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1




記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

検査終了の手順

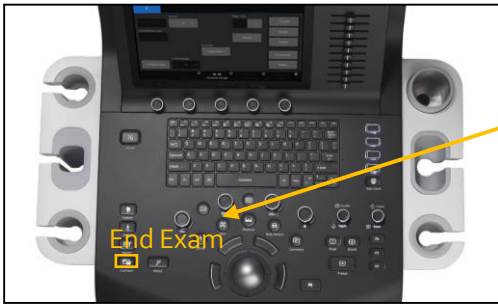

- 1.【End Exam】ボタンを押してください。
Active Image(画像一覧)が表示されます。

- 2.画像一覧から消去したい画像は選択して【Delete】、転送したい画像は【Send to】を選択してください。

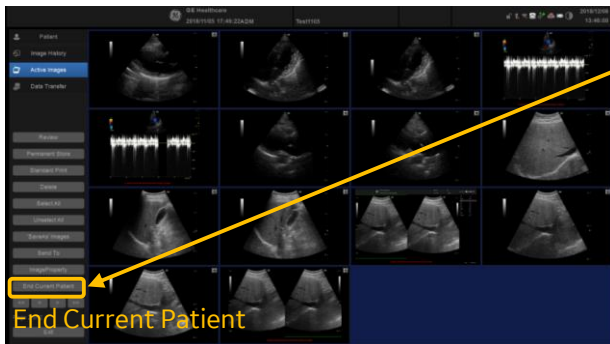

- 3.モニター上の【End Current Patient】を選択して下さい。検査が終了します。

* 設定により、【Patient】ボタンのみで検査終了を行うことも可能です。