

患者情報の登録/検査開始の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本
操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付さ
れている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください


製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1



記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

患者情報の登録/検査開始の手順


1. 操作パネル上の【Patient患者登録】を押して下さい。

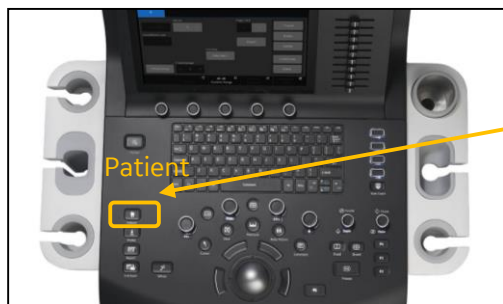

2. 患者登録画面に切り替わりますので、ID、名前、生年月日等を入力して下さい。


例) 1980年12月8日 1980/12/08
S55/12/08

3. 検査カテゴリーを選択します。
カテゴリーのうち目的の検査を選択して下さい。

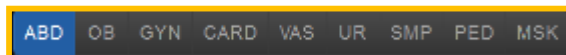

4. 必要項目の入力が終わったら【Scan】を選択して下さい。スキャン画面に移行し検査開始となります。

* このとき【Freeze】キーや【B】ボタンを押しても同様にスキャン画面に移行します。

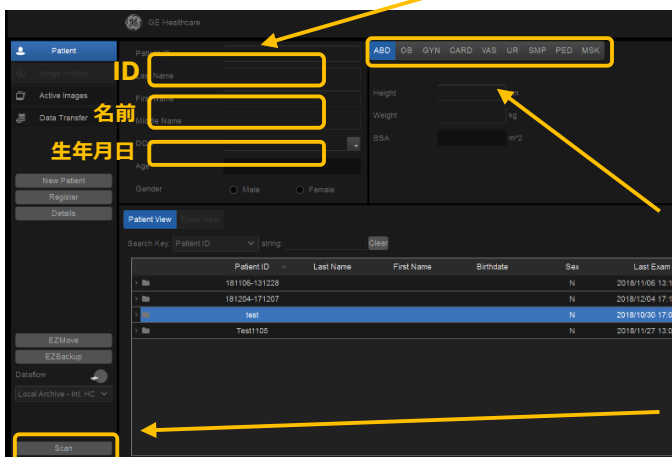

Patient ID	Last Name	First Name	Birthdate	Sex	Last Exam
181106-101228				N	2018/11/05 13:1
181204-171207				N	2018/12/04 17:1
Test105				N	2018/10/20 17:5
Test106				N	2018/11/27 13:3