

プローブ/プリセット選択の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください


製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1



記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

プローブ/プリセット選択の手順

1. 操作パネル上の【Probe】キーを押して下さい。

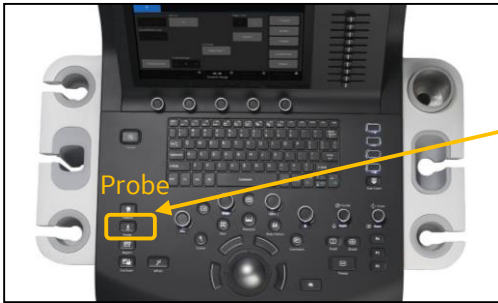

2. タッチパネルの上段に接続されているプローブが表示されます。
使用するプローブをタッチして下さい。



3. 使用するプリセットをタッチして下さい。

Abdomen : 腹部向け
Renal : 腎臓向け
Bladder : 膀胱向け
Adult : 成人循環器向け
Thyroid : 甲状腺向け
Breast : 乳腺向け

MscSkel : 整形外科向け
Carotid : 頸動脈向け
LEV : 下肢静脈向け
LEA : 下肢動脈向け
UEA : 上肢動脈向け