

画像調整等の基本操作の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1




記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

画像調整等の基本操作の手順



フォーカス位置

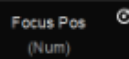


ボタンを回転して、フォーカスの位置を変更します。

深度(depth)

ボタンを回転して、表示深度を調整します。

2画面表示

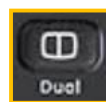

ボタンを押すと2画面表示になります。
もう一度ボタンを押すと、反対側の画面でスキャンが可能です。
* 画面下に緑色のバーがある方が、アクティブ画面です。

Whizz(画像最適化)

ボタンを1度押すと、画像が最適化されます。
Whizzは明るさ、コントラスト、温泉密度、周波数を最適化し、Bモードの均一性を向上させる機能です。

* パルスモードで使用すると、スケールとベースラインを最適化し、最適な波形にします。

ゲイン(輝度)

ボタンを回転して、画面の輝度を調整します。