

ボディーパターン選択の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください


製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1




記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

ボディパターン選択の手順

1. 操作パネルの【Body Pattern】ボタンを押します。

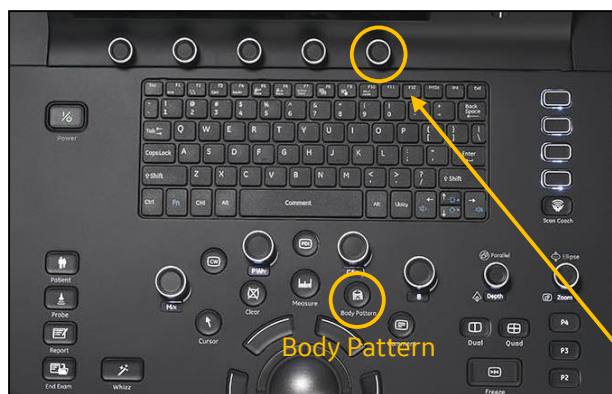

2. タッチパネル上に、以下のようなボディパターンが表示されますのでタッチして選択します。

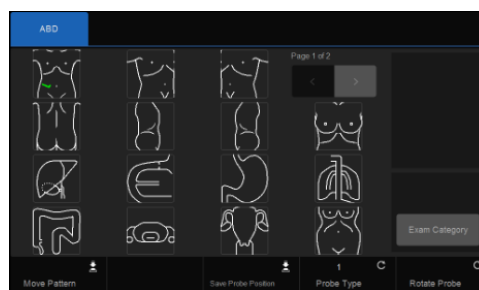

3. ボタンを回転し、プローブの向きを合わせます。
トラックボールで位置の変更をします。

