

コメント選択の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1



記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

コメント選択の手順

1. コメント入力には 2 種類の方法があります。

①操作パネル上の【Comment】ボタンを押します。

タッチパネル上の
コメントをタッチします。

②もしくは、キーボードで、任意のコメントを入力します。

2.トラックボールで任意の場所へ移動し、
Setキーで確定します。

3.コメントの編集、場所を変更したい際は、
カーソルをコメントに合わせてSetを押します。

