

単純計測の操作の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1



記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

単純計測の操作の手順



1. 操作パネルの【Measure】ボタンを押します。



2. キャリパーが表示されますので、トラックボールで始点に移動し、【Set】キーを押します。

3. トラックボールで終点の場所に移動し、【Set】キーを押します。