

パルスドプラ(PW)/連続波ドプラ(CW) モードへの切り替え手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本
操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付さ
れている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1




記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部

パルスドプラー(PW)/連続波ドプラー(CW) モードへの切り替え手順



1.【Set(Mode Cursor)】キーを押すと、ドプラーカーソルが表示されます。

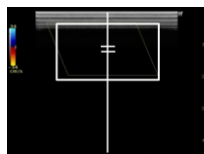

2.トラックボールで、サンプルポイントに位置を合わせます。



3.タッチパネルの上で、サンプルボリューム【SV Length】や角度補正ができます。



4.【Set(PW)】キーを押すとパルスドプラー波形が表示されます。

* CWはアプリケーションで【CARD】を選択すると、表示されます。