

こんなときどうする？ 困った時の対応方法

「設定確認」が押せなくて
撮影が出来ない



Revolution ACT
Auto Computed Tomography


設定確認が押せない場合の対応方法

【設定確認】が押せないと撮影できません
以下の手順で撮影が可能になります

チェックポイント1

ガントリーの基準点ボタンを押しているか？

この場合、コンソールの【開始位置】と【終了位置】が両方とも赤色になっています

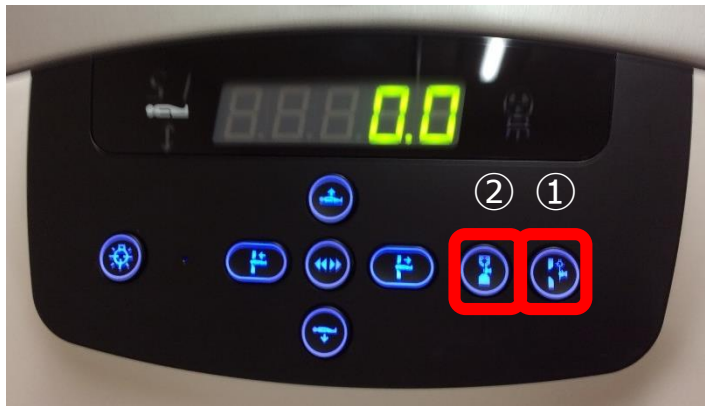

外側のライトでポジショニングした場合①を押す
表示が **190.0** になっていることを確認



内側のライトでポジショニングした場合②を押す
表示が **0.0** になっていることを確認



コンソール側で赤色が解除され撮影可能になります

設定確認が押せない場合の対応方法

チェックポイント2

撮影画面で開始位置または
終了位置のどちらかが赤色になっていないか？

**赤くなっている場合、
撮影可能範囲から外れています！**

①患者さまを寝かせている位置を確認してください
【撮影可能範囲を示すシール】の中に寝かせていますか？

②患者さまを寝かせ直したら、
再度ガントリー横の基準点ボタンを押して、
検査を仕切り直せます

注意！

寝台に紫色のシールが貼ってあります。
これは、撮影可能な最大範囲を表します。
このシールよりガントリー側に患者様を寝か
せてください。



全身用X線CT診断装置 Revolution ACT
FAQマニュアル

薬事販売名称 全身用X線CT診断装置
医療機器認証番号 228ACBZX00005000
管理医療機器 全身用X線CT診断装置 JMDN 37618010

【製造販売業者の名称と連絡先、発行部署】

製造販売業者 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守サービス連絡先 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127
電話 : 0120 - 055 - 919

発行部署 : イメージング本部 CT営業推進部

トラブルに関するお問い合わせ

24時間

操作に関するお問い合わせ

土日・祝日を除く 月～金 9:00 - 18:00