

こんなときどうする？ 困った時の対応方法

スライス厚を変えて撮影したい




Revolution ACT

Auto Computed Tomography

撮影時に条件を変更するには

例) スライス厚の変更

1. スカウト画像を撮影し、[次シリーズ]をクリック
2. [スライス厚モード]をクリック

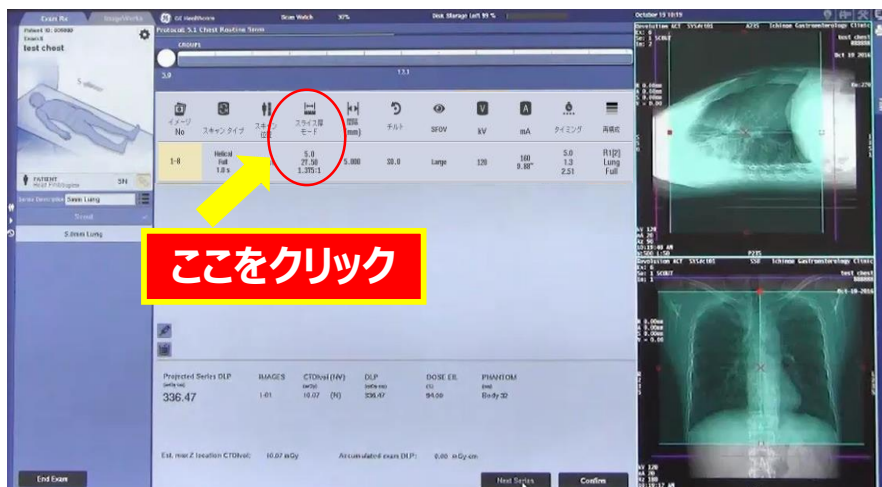

3. 任意のスライス厚をクリック



4. [OK]をクリックしたら、設定完了

全身用X線CT診断装置 Revolution ACT
FAQマニュアル

薬事販売名称 全身用X線CT診断装置
医療機器認証番号 228ACBZX00005000
管理医療機器 全身用X線CT診断装置 JMDN 37618010

【製造販売業者の名称と連絡先、発行部署】

製造販売業者 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守サービス連絡先 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127
電話 : 0120 - 055 - 919

発行部署 : イメージング本部 CT営業推進部

トラブルに関するお問い合わせ

24時間

操作に関するお問い合わせ

土日・祝日を除く 月～金 9:00 - 18:00