

こんなときどうする？ 困った時の対応方法

コロナル・サジタル画像が 自動で出てこない




Revolution ACT

Auto Computed Tomography

コロナルまたはサジタル画像が自動で出てこない場合

1. [検査終了]をクリックすると、モニターの右下にDMPRのタブが表示されます

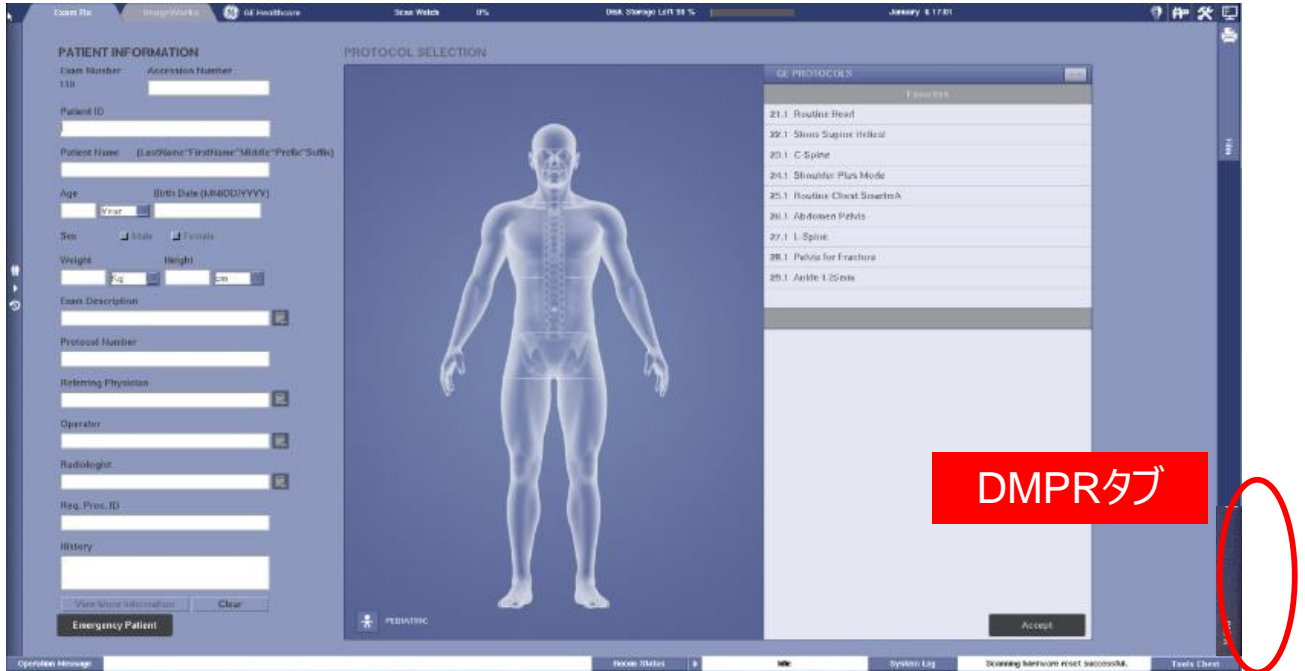


2. DMPRの文字の下に〇〇%と数字が表示され始めたらタブをクリックします

注意！


自動作成の進捗を示す、「〇〇%」が表示されます。表示される前にクリックすると自動作成は一時中断します。

この場合は、再度DMPRタブをクリックして、「〇〇%」の表示が出るまでお待ちください。

ここをクリック

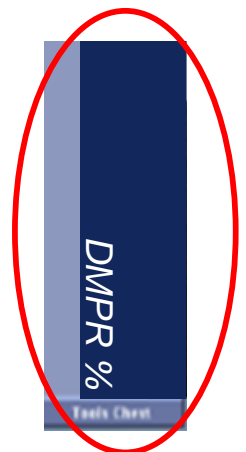

3. 右上の画像上に、作成中の画像の表示が消えていたら、自動作成が終わっています。[終了]をクリックします

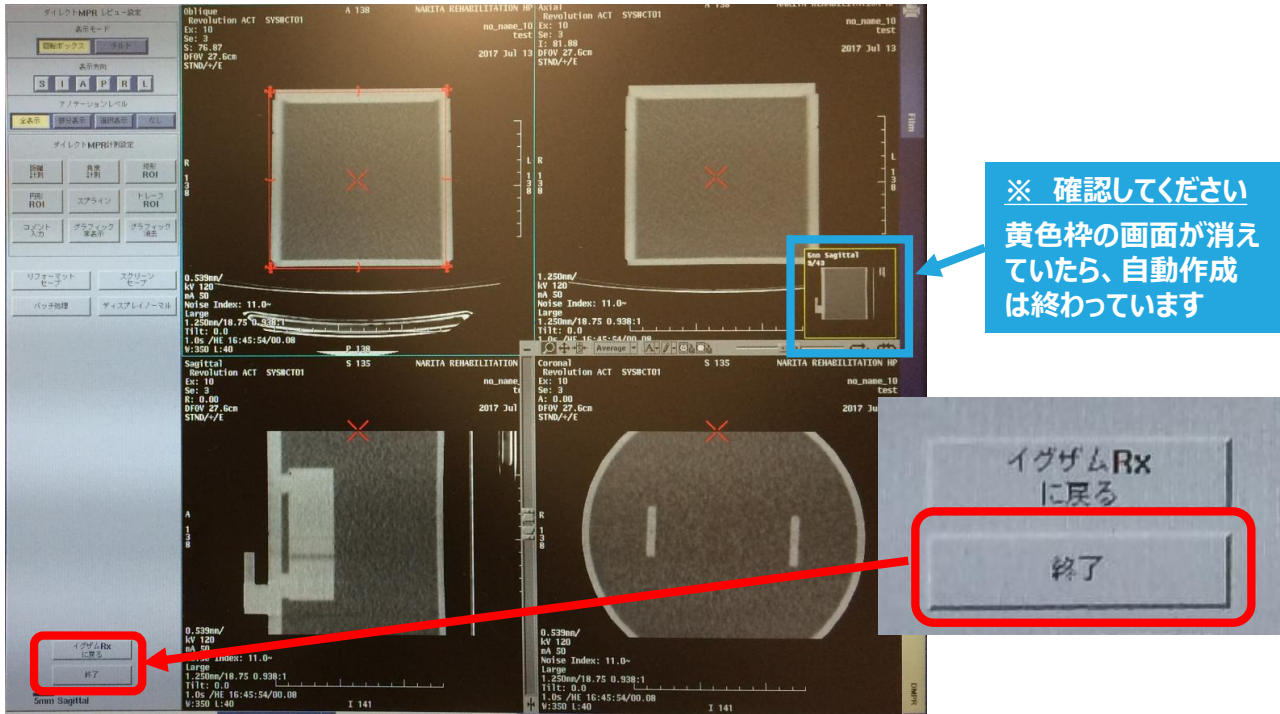

4. [はい]をクリックしてDMPRの画面を閉じます




注意！

DMPR機能を閉じないまま次の検査を行った場合、その検査ではコロナル・サジタル画像の自動作成が行われません。
DMPR機能を使用後は、それを終了させて、次の検査を行ってください。

注意！

画面右上の画像上に作成中の画像が表示されているときに、[終了]をクリックして閉じてしまった場合

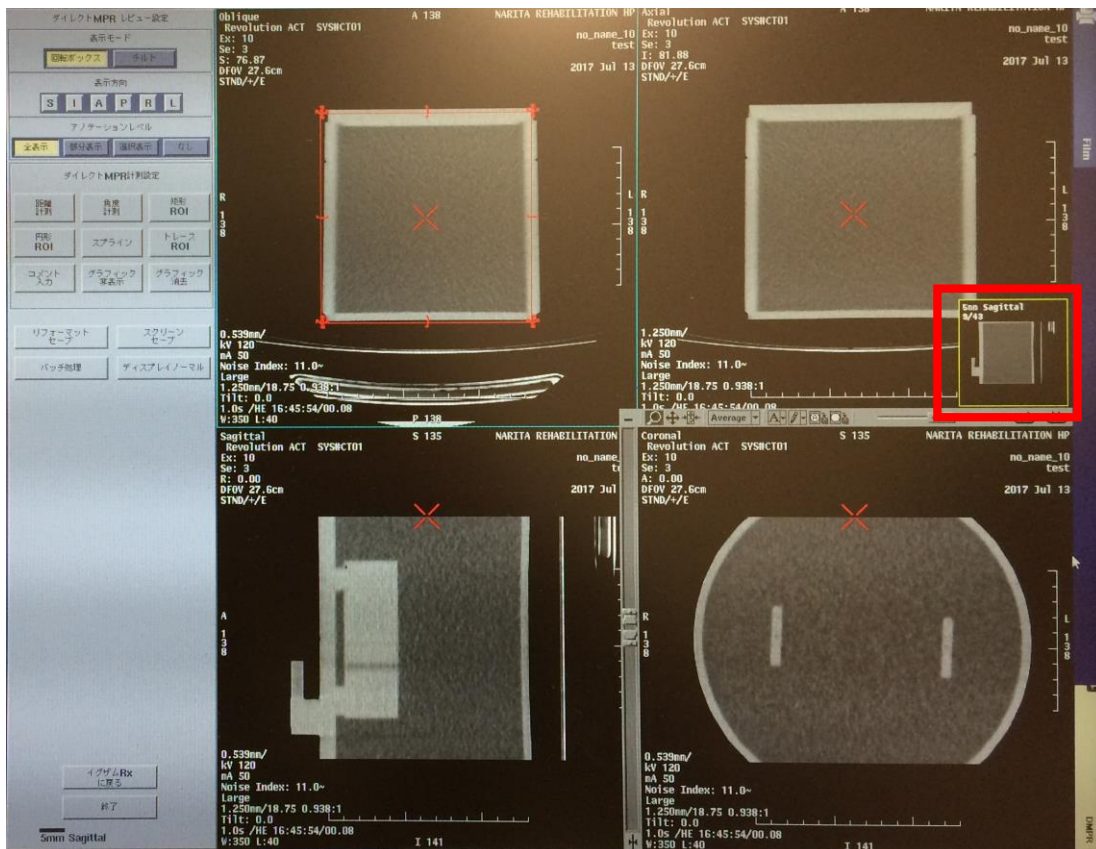

**自動作成の途中で「終了」を押すと、
自動作成は行われません**

手動で画像を作成してください。
操作ガイドのReformat (P.95～) を参照してください。

全身用X線CT診断装置 Revolution ACT
FAQマニュアル

薬事販売名称 全身用X線CT診断装置
医療機器認証番号 228ACBZX00005000
管理医療機器 全身用X線CT診断装置 JMDN 37618010

【製造販売業者の名称と連絡先、発行部署】

製造販売業者 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守サービス連絡先 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127
電話 : 0120 - 055 - 919

発行部署 : イメージング本部 CT営業推進部

トラブルに関するお問い合わせ

24時間

操作に関するお問い合わせ

土日・祝日を除く 月～金 9:00 - 18:00