

# こんなときどうする？ 困った時の対応方法

撮影後に、骨条件の画像に変えて  
画像を再出力したい



**Revolution ACT**  
**Auto Computed Tomography**


# 画像再出力 その1

## 骨条件の画像を再出力する


1. [イグザムRx]画面上で をクリック



2. [レトリコン]をクリック

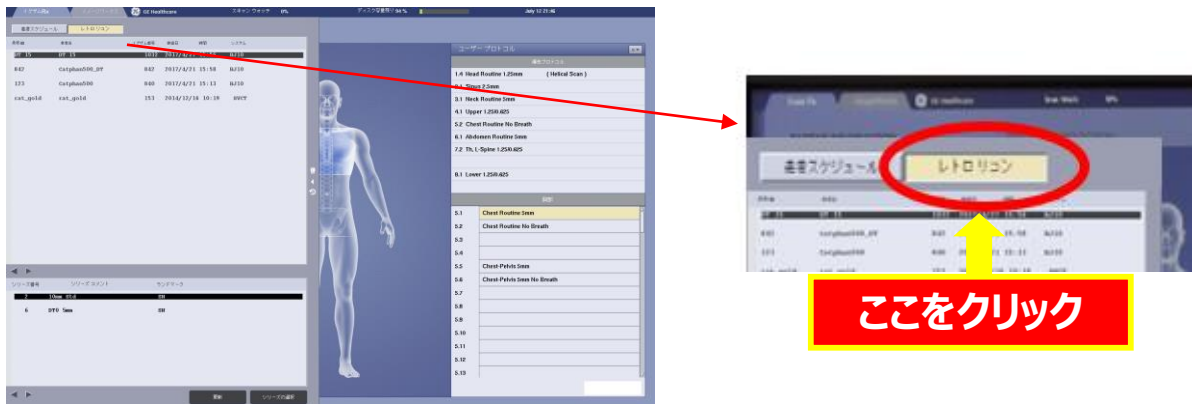


3. 条件を変更して画像を再出力したい患者名を選択して [シリーズ選択]をクリック

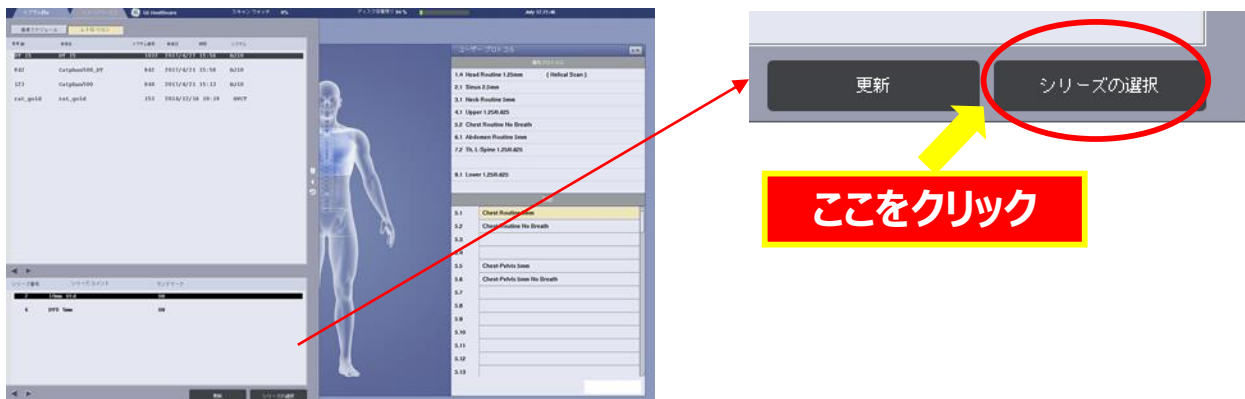

#### 4. [リコンタイプ]をクリック



#### 5. [Bone]をクリック

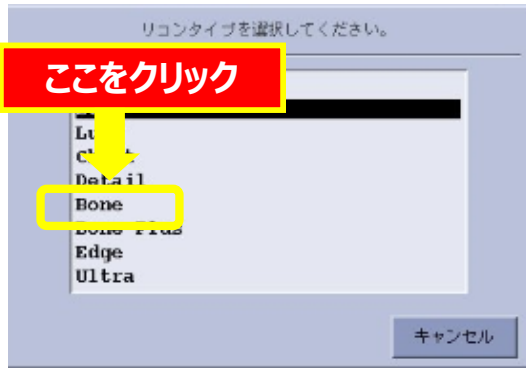

#### 6. [リコンオプション]をクリック



#### 7. ウィンドウ幅、ウィンドウレベルを入力



例  
ウィンドウ幅:2000  
ウィンドウレベル:300

#### 8. [OK]→設定確認→終了の順でクリック

全身用X線CT診断装置 Revolution ACT  
FAQマニュアル

薬事販売名称 全身用X線CT診断装置  
医療機器認証番号 228ACBZX00005000  
管理医療機器 全身用X線CT診断装置 JMDN 37618010

【製造販売業者の名称と連絡先、発行部署】

製造販売業者 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守サービス連絡先 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127  
電話 : 0120 - 055 - 919

発行部署 : イメージング本部 CT営業推進部

トラブルに関するお問い合わせ

24時間

操作に関するお問い合わせ

土日・祝日を除く 月～金 9:00 - 18:00