

こんなときどうする？ 困った時の対応方法

撮影後に、ある部分を拡大して
画像を再出力したい



Revolution ACT
Auto Computed Tomography


画像再出力 その2

領域を変更して画像を再出力する


1. [イグザムRx]画面上で をクリック




2. [レトリコン]をクリック

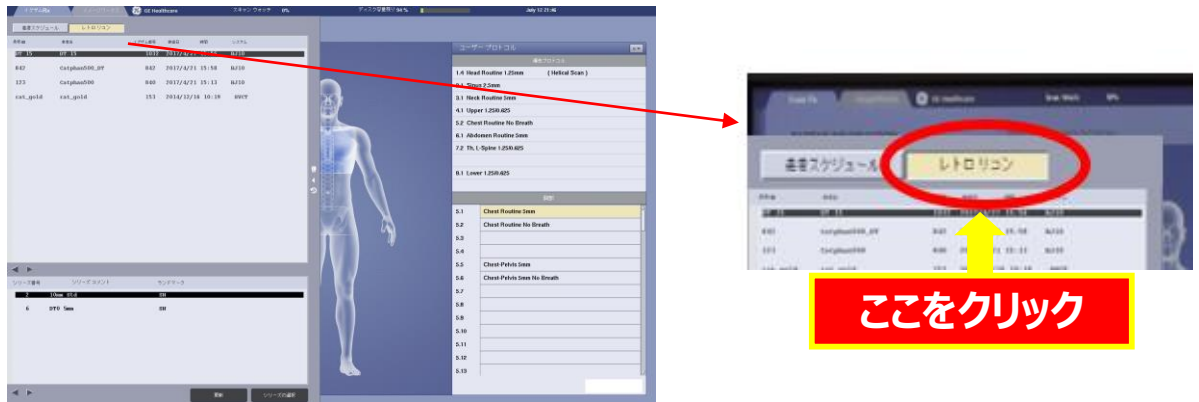


3. 条件を変更して画像を再出力したい患者名を選択して [シリーズ選択]をクリック

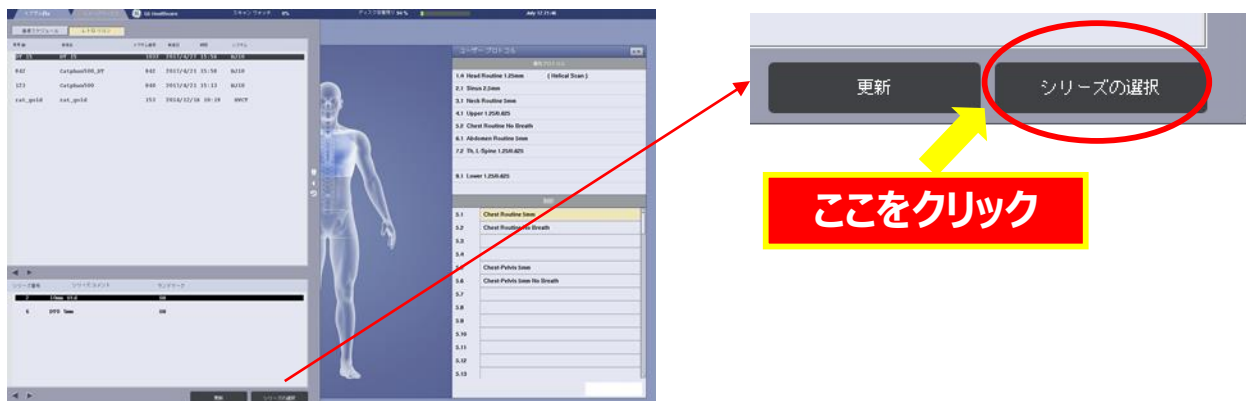

4. グラフィックレトロの“いいえ”をクリック 右上にその患者様の撮影時の画像が表示される

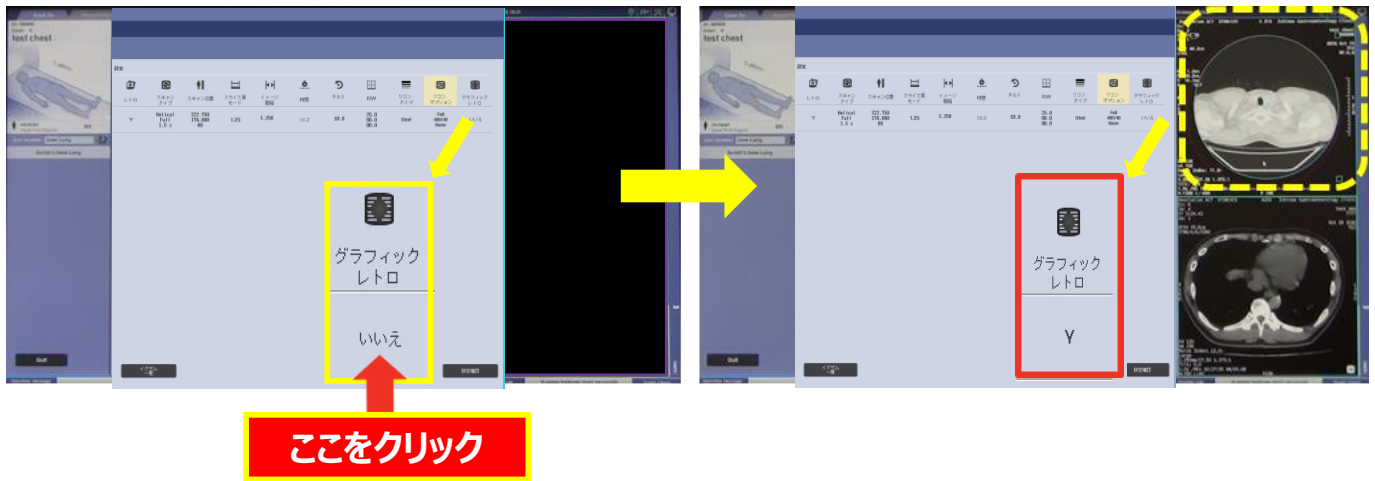


5. 青い円形ラインを使ってDFOVのサイズや中心座標の変更を行う

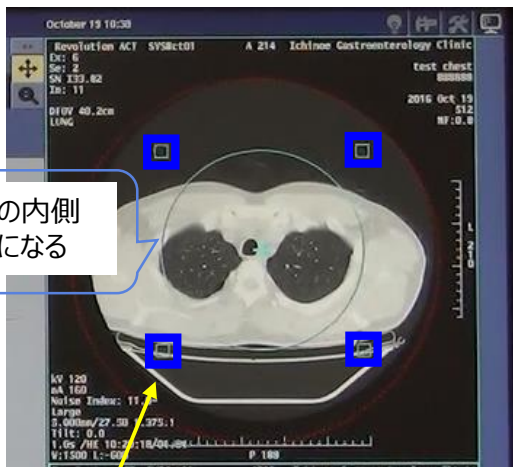

青い円の
内側が
画像になる

端の四角形をつかんでリコンしたい範囲を青い円の
内側に入れる

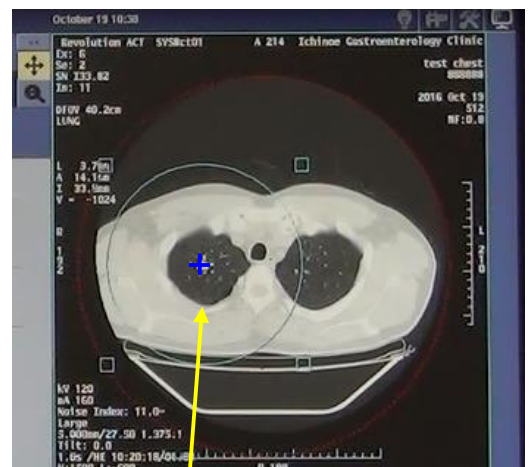

中心の十字マークをリコンする範囲の中心に置く

6. 全ての設定が終了したら、[設定確認]をクリック

7. [終了]をクリック

全身用X線CT診断装置 Revolution ACT
FAQマニュアル

薬事販売名称 全身用X線CT診断装置
医療機器認証番号 228ACBZX00005000
管理医療機器 全身用X線CT診断装置 JMDN 37618010

【製造販売業者の名称と連絡先、発行部署】

製造販売業者 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守サービス連絡先 : GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所 : 東京都日野市旭が丘4-7-127
電話 : 0120 - 055 - 919

発行部署 : イメージング本部 CT営業推進部

トラブルに関するお問い合わせ

24時間

操作に関するお問い合わせ

土日・祝日を除く 月～金 9:00 - 18:00