

レトロリコン条件一覧表

この一覧表は、撮影終了後、3DやMPRを作成するために、改めて画像を出しなおす際の参考としてご活用ください。

部位		スライス厚モード	イメージ間隔	リコンタイプ	リコンオプション
		mm	mm		WW/WL
頭部	血管3D	1.25	1.25	Std	400/40
	骨3D	1.25	1.25	Std	2000/500
	脳実質MPR	1.25	1.25	Std	100/40
	骨MPR	1.25	1.25	Std	2000/500
副鼻腔	軟部MPR	1.25	1.25	Bone	400/40
	骨MPR	1.25	1.25	Bone	2000/500
頸部	血管3D	1.25	1.25	Std	400/40
	骨3D	1.25	1.25	Std	2000/500
	軟部MPR	1.25	1.25	Std	300/40
	骨MPR	1.25	1.25	Bone	2000/500
胸部	大血管3D	1.25	1.25	Std	400/40
	肺野MPR	1.25	1.25	Lung	1500/-500
腹部	大血管3D	1.25	1.25	Std	400/40
	腹部MPR	1.25	1.25	Std	400/40
椎体	3D	1.25	1.25	Std	2000/500
	MPR	1.25	1.25	Bone	2000/500
骨盤	股関節3D	1.25	1.25	Std	2000/500
	股関節MPR	1.25	1.25	Bone	2000/500
上肢/下肢	骨3D	1.25	1.25	Std	2000/500
	骨MPR	1.25	1.25	Bone	2000/500
	血管3D	1.25	1.25	Std	400/40