




T-Stück- Beatmungssystem für Säuglinge

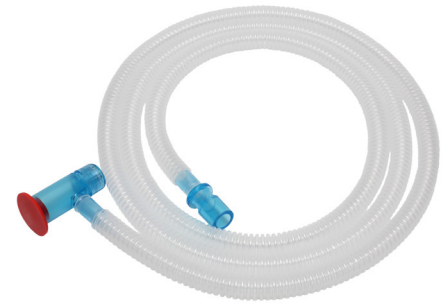

Einweg-T-Stück-Beatmungssystem mit anpassbarem PEEP

Einweg-T-Stück-Beatmungssysteme für Neugeborene dienen zur präzisen und zuverlässigen Beatmung und pulmonalen Reanimation. Sie eignen sich für Entbindungsstationen, Neugeborenen-Intensivstationen und den Transport.

Leistungsmerkmale

- Das PEEP-Regelventil (Positiver end expiratorischer Druck) lässt sich auf einfache Weise drehen, um den Druck genau einzustellen. Der Druck bleibt auch bei längerer Anwendung konstant.
- Das komfortable, ergonomische Design wirkt einer Ermüdung der Hand bei längerer Anwendung entgegen.
- Das auffällig blaue T-Stück ist auf Entbindungsstationen, Neugeborenen-Intensivstationen und beim Patiententransport gut sichtbar.
- Eine Daumen-/Finger-Öffnung ermöglicht eine kontrollierte Inspiration und Expiration. Der Flow kann durch einfaches Auflegen des Fingers auf die Öffnung auf eine Abgabe von 21 % bis 100 % Sauerstoff oder auf einen freien Flow eingestellt werden.
- Der leichtgewichtige, biegsame und bruchsichere Schlauch sorgt auch in verdrehtem Zustand für einen konstanten Luftstrom.

Produktkompatibilität

Der Universalanschluss passt ohne Adapter auf alle gängigen manuellen Beatmungsgeräte.

Unsere Geräte. Unser Zubehör. Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie dem hochwertigem GE Healthcare Zubehör und Verbrauchsartikel für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte

- Einfacher Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Kompetente Beratung
- Unterstützung in allen Situationen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Materialien

Komponenten	Material
PEEP-Ventil-Abdeckung	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
O-Ring	Silikon
Winkelstück	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
15-mm-Ventil-Steckkappe	Polypropylen (PP)
Geriffelter 10-mm-Schlauch	Polypropylen geringer Dichte (LDPE)
10M-15M/15F Anschluss	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Frei von Naturkautschuk-Latex und DEHP

Betriebsbedingungen

Bitte beachten Sie die Empfehlungen im Handbuch des Basisgeräts.

Artikel

Artikelnummer	Beschreibung	Menge
2109059-001	Einweg-T-Stück-Beatmungssystem, Kit	20
2109060-001	Einweg-T-Stück-Beatmungssystem, Kit mit Maske Größe 0	10
2109061-001	Einweg-T-Stück-Beatmungssystem, Kit mit Maske Größe 1	10

Lagerungsbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit

Das Produkt ist fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar. Diese Haltbarkeit basiert auf der Stabilität der Komponenten und Rohmaterialien des Produktes. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jedem einzelnen Produktbeutel deutlich markiert.

Konformität

Anschlüsse sind konform mit ISO 5356.

Kompatibilität mit ISO 5356-konformen Beatmungsgeräten, Gesichtsmasken für Neugeborene und Endotrachealtuben.

Imagination at work

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen GE Healthcare-Repräsentanten. Besuchen Sie auch www.gehealthcare.com.

Vertrieb durch:

Datex-Ohmeda, Inc.



Hergestellt durch:

Flexicare Medical Ltd.

Cynon Valley Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

Großbritannien

© 2018 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrer GE Healthcare-Vertriebsstelle. GE, das GE-Monogramm und Imagination at work sind Marken der General Electric Company.

DOC2193434 Rev. 2 12/18

JB64279XE