

医疗器械召回事件报告表

(公司内部召回编号: FMI 32067-A)

提交: ☒ 企业所在地省级食品药品监督管理部门

☒ 器械注册/备案部门

产品名称	婴儿辐射保暖台	注册证或备案凭证编码	见 附表1 产品信息
生产企业名称	Ohmeda Medical		
代理人名称	通用电气医疗系统贸易发展 (上海) 有限公司		
召回单位负责人和联系方式, 经办人和联系方式	负责人: 韦艺 021-38771633 经办人: 周其珣 021-38771633		
产品的适用范围	见 附表 1 产品信息		
涉及地区和国家	美国、加拿大、中国等国家或地区	召回级别	一级
涉及产品生产 (或进口中国) 批次、数量	1239 台	涉及产品型号、规格	Giraffe、Panda
识别信息 (如批号)	见 附表 2 识别信息	涉及产品在中国的销售数量	1239 台
召回原因简述	本次报告为 GE 中国 2019 年 4 月 2 日编号为 FMI 32067 (沪食药监械主召 2019-060) 的更新。 主要变更内容为: 1. 召回级别变更为一级召回; 2. 新增 111 台受影响产品; 3. 我司将发送修订版客户信告知客户关于此问题和需要采取的进一步措施。 本次召回产品为 婴儿辐射保暖台 (型号: Panda, Giraffe)。GE 医疗近期发现如果使用床边面板而不是前手柄或保暖台背面的操纵手柄移动装置, 则保暖台上的床边面板或门锁部位可能会破裂、破损或损坏。如果婴儿接触门锁破裂或破损或面板损坏的床边面板, 面板可能脱离并打开, 无法再防止婴儿从保暖台掉落。 GE 医疗中国未收到与该问题相关的市场反馈、国内投诉、不良事件相关信息, 也还没有因此问题而受伤的报告。维护高标准的安全和质量是我们的首要任务, GE 医疗决定对涉及产品采取主动召回。		

纠正行动简述 (包括召回要求和处理方式等)	1. 发送修订版客户信告知客户关于此问题和需要采取的进一步措施; 2. GE 医疗派工程师至现场对受影响的产品进行免费修正; 3. GE 医疗将继续监测和评估召回措施的有效性; 4. 本次召回不涉及受影响产品的停用及撤回。
-----------------------	--

报告单位:(盖章)

报告人:

周其璋



负责人:

李光

首次报告日期:2019年04月02日

本次报告日期:2019年07月31日

附表 1 产品信息

产品名称	产品型号	注册证号	产品适用范围
	Panda	国械注进 20153540985	婴儿辐射保暖台用于为婴儿和儿科病人提供控制的辐射热源。它可用于帮助新生儿过渡到外部环境, 或为婴儿创造一个受控制的开放环境。可选的集成式 SpO2 监测功能可用于对脉搏血氧饱和度 (SpO2) 和脉率 (由 SpO2 传感器测量) 进行持续的无创监测。可选的集成式复苏系统可用于为婴儿肺复苏提供必需的基本设备。肺复苏包括保持气道通畅、提供氧气或空气/氧气的混合气体, 及/或对婴儿进行手持通气。
		国食药监械(进)字 2010 第 3543187 号	本产品用于对婴儿和儿科病人提供控制的辐射热源。
婴儿辐射保暖台			婴儿辐射保暖台用于为婴儿和儿科病人提供控制的辐射热源。它可用于帮助新生儿过渡到外部环境, 或为婴儿
	Giraffe	国械注进 20153540683	创造一个受控制的开放环境。可选的集成式 SpO2 监测功能可用于对脉搏血氧饱和度 (SpO2) 和脉率 (由 SpO2 传感器测量) 进行持续的无创监测。可选的集成式复苏系统可用于为婴儿肺复苏提供必需的基本设备。肺复苏包括保持气道通畅、提供氧气或空气/氧气的混合气体, 及/或对婴儿进行手持通气。
		国食药监械(进)字 2010 第 3543186 号	本产品用于对婴儿和儿科病人提供控制的辐射热源。

附表 2 识别信息

#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号
1	GBWV60181	41	PBWW60853	81	PBWW62406	121	PBWX60147	161	PBWX60268
2	GBWV60406	42	PBWX60395	82	PBWW62407	122	PBWX60150	162	PBWX60269
3	PBWW60428	43	PBWW60801	83	PBWW61846	123	PBWX60163	163	PBWX60270
4	PBWW60508	44	PBWW60794	84	PBWW62702	124	PBWX60166	164	PBWX60271
5	PBWW60081	45	PBWW61864	85	PBWW62717	125	PBWX60154	165	GBWX60043
6	PBWW60082	46	PBWW61862	86	PBWW62718	126	PBWX60155	166	GBWX60078
7	PBWW61543	47	PBWW61863	87	PBWW62721	127	PBWX60251	167	PBWX60505
8	PBWW60288	48	PBWW61843	88	PBWW62726	128	PBWW62700	168	PBWX60507
9	PBWW61851	49	PBWW61855	89	PBWW62722	129	PBWW62552	169	PBWX60508
10	GBWV60402	50	PBWW62396	90	PBWW62723	130	PBWW62562	170	PBWX60513
11	GBWV60403	51	PBWW62398	91	PBWW62724	131	GBWW60803	171	PBWX60128
12	GBWV60404	52	PBWW62402	92	PBWW62725	132	PBWW62697	172	PBWX60503
13	GBWV60407	53	PBWW62403	93	PBWX60129	133	PBWW62556	173	PBWX60546
14	GBWW60090	54	PBWW62405	94	PBWX60153	134	PBWW62555	174	GBWX60076
15	GBWW60091	55	PBWW62408	95	PBWW62551	135	PBWW62563	175	GBWX60077
16	PBWW60083	56	PBWX60052	96	PBWW62554	136	PBWW62561	176	GBWX60079
17	GBWW60087	57	PBWX60056	97	PBWW62400	137	PBWW62564	177	PBWX60511
18	PBWW61264	58	PBWX60061	98	PBWW62410	138	PBWX60132	178	PBWX60512
19	PBWW60854	59	PBWX60062	99	GBWV60180	139	PBWW62550	179	PBWX60510
20	PBWW60286	60	PBWX60158	100	GBWW60089	140	GBWW60801	180	PBWX60514
21	PBWW61261	61	GBWW60088	101	GBWW60092	141	GBWW60802	181	PBWX60596
22	PBWW61498	62	PBWW61865	102	GBWW60542	142	GBWW60804	182	GBWX60243
23	PBWW61257	63	PBWW60850	103	GBWW60543	143	GBWW60805	183	GBWX60244
24	PBWW61265	64	PBWW61847	104	GBWW60544	144	GBWX60041	184	PBWX60504
25	PBWW61845	65	PBWW61848	105	GBWW60545	145	GBWX60042	185	PBWX60544
26	PBWW61544	66	PBWW61850	106	GBWW60546	146	GBWX60075	186	GBWX60242
27	PBWW60285	67	PBWW61852	107	PBWW62558	147	PBWX60053	187	GBWX60245
28	PBWW60287	68	PBWW61853	108	PBWW62404	148	PBWX60060	188	PBWX60506
29	PBWW60851	69	PBWW61854	109	PBWW62557	149	PBWX60263	189	PBWX60509
30	PBWW60852	70	PBWW61856	110	PBWW62560	150	PBWX60165	190	PBWX60543
31	GBWV60400	71	PBWW61861	111	PBWW62698	151	PBWX60255	191	PBWX60545
32	GBWV60401	72	PBWW62553	112	PBWW62705	152	PBWX60141	192	PBWX60597
33	PBWW60796	73	PBWW62559	113	PBWW62704	153	PBWX60168	193	GBWX60227
34	PBWW60802	74	GBWV60182	114	HDJV60657	154	PBWX60169	194	GBWX60232
35	HDJV60226	75	GBWV60183	115	PBWW62399	155	PBWX60259	195	PBWX60343
36	HDJT61150	76	PBWW60797	116	PBWW62701	156	PBWX60264	196	PBWX60386
37	HDJT61169	77	PBWW62409	117	PBWW62703	157	PBWX60260	197	PBWX60389
38	PBWW60798	78	PBWW61844	118	PBWW62699	158	PBWX60261	198	PBWX60390
39	PBWW60793	79	PBWW62397	119	PBWX60027	159	PBWX60265	199	PBWX60392
40	PBWW60795	80	PBWW62401	120	PBWX60063	160	PBWX60266	200	PBWX60397

附表 2 识别信息 (续)

#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号
201	PBWX60399	241	PBWX60143	281	PBWX60944	321	PBWX60919	361	HDJR50039
202	PBWX60400	242	PBWX60159	282	GBWX60322	322	PBWX60922	362	HDJR50040
203	PBWX60130	243	PBWX60149	283	GBWX60326	323	PBWX60926	363	HDJR50041
204	PBWX60133	244	PBWX60906	284	GBWX60287	324	PBWX60928	364	HDJR50042
205	PBWX60134	245	PBWX60156	285	GBWX60288	325	PBWX60929	365	HDJR50043
206	PBWX60136	246	PBWX60146	286	GBWX60290	326	PBWX60931	366	HDJR50044
207	PBWX60137	247	PBWX60160	287	GBWX60292	327	PBWX60946	367	HDJR50045
208	GBWX60228	248	PBWX60247	288	GBWX60293	328	PBWX60904	368	HDJR50046
209	GBWX60229	249	PBWX60057	289	PBWX60484	329	GBWX60332	369	HDJR50048
210	GBWX60230	250	GBWX60237	290	PBWX60488	330	PBWX72032	370	HDJR50049
211	GBWX60231	251	GBWX60235	291	PBWX60489	331	PBWX72015	371	HDJR50050
212	GBWX60233	252	GBWX60238	292	PBWX60913	332	PBWX72024	372	HDJR50073
213	GBWX60234	253	PBWX60139	293	PBWX60917	333	PBWX72026	373	HDJR50075
214	GBWX60236	254	PBWX60248	294	PBWX60925	334	PBWX72030	374	HDJR50076
215	PBWX60396	255	PBWX60249	295	GBWX60325	335	PBWX72039	375	HDJR50078
216	PBWX60138	256	GBWX60239	296	PBWX60879	336	PBWX60938	376	HDJR50079
217	PBWX60151	257	PBWX60258	297	PBWX60930	337	PBWX60902	377	HDJQ51523
218	PBWX60162	258	PBWX60918	298	PBWX60388	338	PBWX60900	378	HDJR50071
219	PBWX60167	259	PBWX60921	299	PBWX60936	339	PBWX60916	379	HDJR50072
220	PBWX60170	260	PBWX60932	300	PBWX60901	340	PBWX60920	380	HDJR50074
221	PBWX60171	261	PBWX60935	301	PBWX60911	341	PBWX60924	381	HDJR50077
222	PBWX60172	262	GBWX60289	302	PBWX60912	342	PBWX60934	382	HDJR50047
223	PBWX60250	263	PBWX60482	303	PBWX60914	343	PBWX60943	383	HDJR50037
224	PBWX60252	264	PBWX60483	304	PBWX60915	344	GBWX60334	384	HDJQ52001
225	PBWX60253	265	PBWX60485	305	PBWX60885	345	GBWX60338	385	HDJR50026
226	PBWX60254	266	PBWX60486	306	PBWX60888	346	GBWX60341	386	HDJR50027
227	PBWX60256	267	PBWX60487	307	PBWX60891	347	PBWX60903	387	HDJR52027
228	PBWX60257	268	PBWX60490	308	PBWX60393	348	PBWX60909	388	HDJR52033
229	PBWX60481	269	PBWX60937	309	PBWX60394	349	HDJQ51553	389	HDJR52035
230	PBWX60387	270	PBWX60939	310	GBWX60335	350	HDJQ51560	390	HDJR52026
231	PBWX60054	271	PBWX60947	311	PBWX60889	351	HDJQ50773	391	HDJR52056
232	PBWX60145	272	PBWX60882	312	PBWX60908	352	HDJQ52002	392	HDJR52059
233	PBWX60391	273	PBWX60883	313	PBWX60881	353	HDJQ52005	393	HDJR52030
234	PBWX60398	274	PBWX60884	314	PBWX60907	354	HDJR50031	394	HDJR52034
235	PBWX60140	275	PBWX60886	315	GBWX60323	355	HDJR50032	395	HDJR52025
236	PBWX60161	276	PBWX60887	316	GBWX60324	356	HDJR50033	396	HDJR52053
237	PBWX60131	277	PBWX60893	317	GBWX60327	357	HDJR50034	397	HDJR54323
238	PBWX60059	278	PBWX60895	318	GBWX60328	358	HDJR50035	398	HDJR56811
239	PBWX60144	279	PBWX60897	319	PBWX60898	359	HDJR50036	399	HDJR56812
240	PBWX60152	280	PBWX60905	320	GBWX60294	360	HDJR50038	400	HDJR52055

附表 2 识别信息 (续)

#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号
401	HDJR56813	441	HDJS51435	481	HDJS53416	521	HDJT51021	561	HDJT61302
402	HDJR56814	442	HDJS52771	482	HDJS53419	522	HDJT50296	562	HDJT60527
403	HDJR56815	443	HDJS52215	483	HDJS53420	523	HDJT51092	563	HDJT60525
404	HDJR52054	444	HDJS52216	484	HDJS53292	524	HDJT51098	564	HDJT61296
405	HDJR52061	445	HDJS52212	485	HDJS52652	525	HDJS53311	565	HDJT60529
406	HDJR52062	446	HDJS52221	486	HDJS52758	526	HDJS52851	566	HDJT60533
407	HDJQ52845	447	HDJS52222	487	HDJS53293	527	HDJS53308	567	HDJT60526
408	HDJR52060	448	HDJS52213	488	HDJS52750	528	HDJT50295	568	HDJT60528
409	HDJR52063	449	HDJS52477	489	HDJS52755	529	HDJT50298	569	HDJT60530
410	HDJR54329	450	HDJS52480	490	HDJT50288	530	HDJS52850	570	HDJT60531
411	HDJR56067	451	HDJS52481	491	HDJT50279	531	HDJS52849	571	HDJT61095
412	HDJR57349	452	HDJS52484	492	HDJT50292	532	HDJT61245	572	HDJT61315
413	HDJR54330	453	HDJS52486	493	HDJT50277	533	HDJS53475	573	HDJT61269
414	HDJR56068	454	HDJS52435	494	HDJT50299	534	HDJS52463	574	HDJT61283
415	HDJR57348	455	HDJS52677	495	HDJT50300	535	HDJT51024	575	HDJT61256
416	HDJR57353	456	HDJS52678	496	HDJS52757	536	HDJT60046	576	HDJT61312
417	HDJR57354	457	HDJS52679	497	HDJS52766	537	HDJT60300	577	HDJT51662
418	HDJR57355	458	HDJS52783	498	HDJS53309	538	HDJS51299	578	HDJT60511
419	HDJR57082	459	HDJS52482	499	HDJS53313	539	HDJS53474	579	HDJT61289
420	HDJR58233	460	HDJS52210	500	HDJS52763	540	HDJT60045	580	HDJT61313
421	HDJR58235	461	HDJS52214	501	HDJS53291	541	HDJT52010	581	HDJT61261
422	HDJR57351	462	HDJS52415	502	HDJS53304	542	HDJT61177	582	HDJT61145
423	HDJR57681	463	HDJS52753	503	HDJT50289	543	HDJT50284	583	HDJT61147
424	HDJR57365	464	HDJT50291	504	HDJT50285	544	HDJT60532	584	HDJT61155
425	HDJR57363	465	HDJS52749	505	HDJT51023	545	HDJS52464	585	HDJT61161
426	HDJR56984	466	HDJS52754	506	HDJT51032	546	HDJS52465	586	HDJT61179
427	HDJR57735	467	HDJS53294	507	HDJT50297	547	HDJT50566	587	HDJU66012
428	HDJR57295	468	HDJS52765	508	HDJT50287	548	HDJS53476	588	HDJT61276
429	HDJR57296	469	HDJS52773	509	HDJT50290	549	HDJT50985	589	HDJT61307
430	HDJR54328	470	HDJS53290	510	HDJT51093	550	HDJT51589	590	HDJT61231
431	HDJR57679	471	HDJS53295	511	HDJT51096	551	HDJT52023	591	HDJT61233
432	HDJR57682	472	HDJS53296	512	HDJT51402	552	HDJT61299	592	HDJT61252
433	HDJR57731	473	HDJS53297	513	HDJT51403	553	HDJT61240	593	HDJT60524
434	HDJR57736	474	HDJS53298	514	HDJT51404	554	HDJT61241	594	HDJT60523
435	HDJS50613	475	HDJS53299	515	HDJT51405	555	HDJT61262	595	HDJT61281
436	HDJS50614	476	HDJS53300	516	HDJT51406	556	HDJT61263	596	HDJT60521
437	HDJS50869	477	HDJS53301	517	HDJT51407	557	HDJT61298	597	HDJT61168
438	HDJS50866	478	HDJS53302	518	HDJT50276	558	HDJT61300	598	HDJT61171
439	HDJS51412	479	HDJS53305	519	HDJT51027	559	HDJT61293	599	HDJT61237
440	HDJS51438	480	HDJS52764	520	HDJT51031	560	HDJT61310	600	HDJT61270

附表 2 识别信息 (续)

#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号
601	HDJT61290	641	HDJT61280	681	HDJV60252	721	PB WV60533	761	HDJS51993
602	HDJT61291	642	HDJU66165	682	HDJV60253	722	PB WV60537	762	HDJS51992
603	HDJT61292	643	HDJT61278	683	HDJV60259	723	PB WV60538	763	HDJS52414
604	HDJT61279	644	HDJT61242	684	HDJV60263	724	HDJV60991	764	HDJS52475
605	HDJT61271	645	HDJT61247	685	HDJV60264	725	PB WV61255	765	HDJS52476
606	HDJT61304	646	HDJT61282	686	HDJV60791	726	HDJV61016	766	HDJS52479
607	HDJU66004	647	HDJU66011	687	HDJV60792	727	PB WV61366	767	HDJS52487
608	HDJU66167	648	HDJT61176	688	HDJV60988	728	PB WV61371	768	PB WV60084
609	HDJT61287	649	HDJV60409	689	HDJV60990	729	PB WV61362	769	PB WV60085
610	HDJT61288	650	HDJV60412	690	HDJV60995	730	PB WV61363	770	PB WV60799
611	HDJT61146	651	HDJV60413	691	HDJV60996	731	PB WV61365	771	PB WV60800
612	HDJT61163	652	HDJV60415	692	HDJV60246	732	PB WV61367	772	HDJQ52846
613	HDJT61268	653	HDJV60416	693	HDJV60251	733	PB WV61369	773	HDJR57022
614	HDJT61272	654	HDJV60417	694	HDJV60258	734	PB WV61372	774	HDJR57895
615	HDJU66017	655	HDJV60418	695	HDJV60796	735	PB WV61373	775	HDJR58226
616	HDJT61232	656	HDJV60420	696	HDJV60256	736	PB WV61374	776	HDJR58229
617	HDJU66003	657	HDJV60421	697	PB WV60535	737	HDJV60989	777	HDJR58227
618	HDJT61235	658	HDJV60422	698	PB WV60603	738	HDJV60993	778	HDJR58228
619	HDJU66190	659	HDJU66006	699	PB WV60606	739	GB WV60184	779	HDJR58231
620	HDJT61303	660	HDJT61154	700	HDJV60255	740	PB WV61251	780	HDJR58232
621	HDJT61311	661	HDJV60408	701	PB WV60605	741	PB WV61258	781	HDJR57361
622	HDJT61295	662	HDJV60410	702	PB WV60607	742	PB WV61263	782	HDJR57364
623	HDJT61258	663	HDJV60411	703	PB WV60534	743	PB WV61253	783	HDJR57366
624	HDJT61266	664	HDJV60419	704	PB WV60536	744	PB WV61256	784	HDJR57367
625	HDJT61286	665	HDJV60793	705	HDJV60656	745	PB WV61364	785	HDJR57674
626	HDJT61255	666	HDJV60800	706	HDJV60659	746	PB WV61370	786	HDJR57675
627	HDJT61275	667	HDJV60414	707	PB WV60609	747	GB WV60408	787	HDJR57676
628	HDJT61238	668	HDJU66002	708	PB WV60611	748	PB WV61262	788	HDJR58230
629	HDJT61239	669	HDJV60658	709	HDJV60997	749	PB WV61260	789	HDJS53412
630	HDJT61246	670	HDJV60798	710	HDJV60650	750	PB WV61254	790	HDJS53414
631	HDJT61249	671	HDJV60257	711	HDJV60224	751	PB WX60058	791	HDJS53415
632	HDJT61253	672	HDJV60654	712	PB WV60604	752	PB WX60065	792	HDJS53417
633	HDJU66170	673	HDJV60651	713	PB WV60612	753	HDJR50067	793	HDJS53418
634	HDJT61243	674	HDJV60262	714	PB WV60608	754	HDJR50068	794	HDJS53422
635	HDJT61309	675	HDJV60795	715	PB WV61368	755	HDJR50069	795	HDJS53423
636	HDJT61244	676	HDJV60797	716	PB WV61375	756	HDJR50070	796	HDJS53424
637	HDJU66014	677	HDJV60247	717	PB WV61252	757	PB WX60135	797	HDJS53425
638	HDJU66020	678	HDJV60248	718	PB WV61259	758	HDJS50868	798	HDJS53426
639	HDJT61273	679	HDJV60249	719	PB WV60531	759	HDJS50872	799	HDJT50280
640	HDJT61257	680	HDJV60250	720	PB WV60532	760	HDJS51991	800	HDJT50281

附表 2 识别信息 (续)

#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号
801	HDJT61294	841	PBWX60064	881	HDJQ50771	921	HDJR57081	961	HDJS52416
802	PBWW60610	842	PBWX60142	882	HDJQ50772	922	HDJR57297	962	HDJS52417
803	HDJR52046	843	HDJR52028	883	HDJQ51249	923	HDJR57293	963	HDJS52418
804	HDJR58234	844	HDJR52029	884	HDJQ51302	924	HDJR57362	964	HDJS52478
805	HDJS50870	845	HDJR57896	885	HDJQ51376	925	HDJR57347	965	HDJS52483
806	HDJV60261	846	PBWW61496	886	HDJQ51377	926	HDJR57350	966	HDJS52485
807	PBWW61547	847	PBWX60055	887	HDJQ51378	927	HDJR57352	967	HDJS52778
808	PBWW62706	848	PBWX60157	888	HDJQ51379	928	HDJR57677	968	HDJS52779
809	HDJT50282	849	PBWX60933	889	HDJQ51380	929	HDJR57678	969	HDJS52780
810	GBWV60405	850	PBWX60940	890	HDJQ51381	930	HDJR57680	970	HDJS52781
811	GBWV60409	851	PBWX60941	891	HDJQ51382	931	HDJR57732	971	HDJS52782
812	PBWX60910	852	PBWX60945	892	HDJQ51383	932	HDJR57733	972	HDJS52784
813	HDJQ52004	853	HDJV60655	893	HDJQ51384	933	HDJR57734	973	HDJS52756
814	HDJQ52006	854	HDJV61074	894	HDJQ51385	934	HDJR57737	974	HDJS52759
815	PBWW61545	855	HDJQ50610	895	HDJQ51556	935	HDJR57897	975	HDJS52760
816	PBWX60267	856	HDJQ50611	896	HDJQ51557	936	HDJR57898	976	HDJS52761
817	PBWX60262	857	HDJQ50612	897	HDJQ51558	937	HDJR57899	977	HDJS52762
818	GBWX60291	858	HDJQ50614	898	HDJQ51559	938	HDJS50615	978	HDJS52767
819	PBWW61376	859	HDJQ50615	899	HDJQ51576	939	HDJS50867	979	HDJS52768
820	PBWW60284	860	HDJQ50616	900	HDJQ51577	940	HDJS50871	980	HDJS52770
821	HDJT50278	861	HDJQ50617	901	HDJQ51578	941	HDJS51408	981	HDJS52772
822	HDJU66005	862	HDJQ50618	902	HDJQ51522	942	HDJS51409	982	HDJS52774
823	HDJU66007	863	HDJQ50619	903	HDJQ51996	943	HDJS51410	983	HDJS52775
824	HDJU66008	864	HDJQ50620	904	HDJQ51997	944	HDJS51411	984	HDJS53310
825	HDJU66009	865	HDJQ50621	905	HDJQ51998	945	HDJS51413	985	HDJS53312
826	HDJU66013	866	HDJQ50623	906	HDJQ52000	946	HDJS51433	986	HDJS53303
827	HDJU66018	867	HDJQ50599	907	HDJQ52003	947	HDJS51434	987	HDJS53413
828	HDJU66019	868	HDJQ50600	908	HDJR50025	948	HDJS51436	988	HDJS53421
829	HDJU66168	869	HDJQ50601	909	HDJR50028	949	HDJS51437	989	HDJS53339
830	PBWX60942	870	HDJQ50602	910	HDJR52047	950	HDJS52211	990	HDJT50283
831	PBWX60927	871	HDJQ50604	911	HDJR52031	951	HDJS52217	991	HDJT50286
832	HDJS52769	872	HDJQ50605	912	HDJR52032	952	HDJS52218	992	HDJT50293
833	PBWW61849	873	HDJQ50608	913	HDJR52049	953	HDJS52219	993	HDJT50294
834	PBWW62719	874	HDJQ50609	914	HDJR52050	954	HDJS52220	994	HDJT51022
835	PBWW62720	875	HDJQ50765	915	HDJR52051	955	HDJS52429	995	HDJT51025
836	PBWX60051	876	HDJQ50766	916	HDJR52052	956	HDJS52430	996	HDJT51026
837	PBWX60148	877	HDJQ50686	917	HDJR52057	957	HDJS52431	997	HDJT51028
838	PBWX60164	878	HDJQ50687	918	HDJR52058	958	HDJS52432	998	HDJT51029
839	HDJR52048	879	HDJQ50769	919	HDJR52064	959	HDJS52433	999	HDJT51030
840	HDJQ52844	880	HDJQ50770	920	HDJR56985	960	HDJS52434	1000	HDJT51094

附表 2 识别信息 (续)

#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号	#	序列号
1001	HDJT51095	1041	HDJT61265	1081	HDJV60452	1121	HDJR58221	1161	GBWX70451
1002	HDJT51097	1042	HDJT61250	1082	HDJV60652	1122	HDJS51990	1162	GBWX70452
1003	HDJT51099	1043	HDJT61251	1083	HDJV60653	1123	HDJS51994	1163	GBWX70453
1004	HDJS52466	1044	HDJT61254	1084	HDJV60794	1124	HDJS52751	1164	GBWX70454
1005	HDJT51125	1045	HDJT61260	1085	HDJV60799	1125	HDJS52752	1165	GBWX70455
1006	HDJT60297	1046	HDJT61144	1086	HDJV60992	1126	HDJQ50598	1166	PBWX72537
1007	HDJT60298	1047	HDJT61259	1087	HDJV60994	1127	HDJQ50603	1167	PBWX72538
1008	HDJT60299	1048	HDJT61264	1088	HDJV61065	1128	HDJQ50690	1168	PBWX72539
1009	HDJT60301	1049	HDJT61267	1089	HDJV61066	1129	PBWX60878	1169	PBWX72540
1010	HDJT60302	1050	HDJT61274	1090	HDJV61067	1130	PBWX60880	1170	PBWX72541
1011	HDJT60303	1051	HDJT61248	1091	HDJV61068	1131	PBWX60890	1171	PBWX72542
1012	HDJT60509	1052	HDJT61277	1092	HDJV61069	1132	PBWX60892	1172	PBWX72543
1013	HDJT60510	1053	HDJT61285	1093	HDJV61070	1133	PBWX60894	1173	PBWX72544
1014	HDJT60522	1054	HDJT61284	1094	HDJV61071	1134	PBWX60896	1174	PBWX72545
1015	HDJT61142	1055	HDJT61297	1095	HDJV61072	1135	PBWX60899	1175	PBWX72546
1016	HDJT61143	1056	HDJT61306	1096	HDJV61073	1136	PBWX60923	1176	PBWX72547
1017	HDJT61148	1057	HDJT61308	1097	HDJV61015	1137	GBWX60333	1177	PBWX72548
1018	HDJT61151	1058	HDJT61317	1098	HDJV61017	1138	GBWX60336	1178	PBWX72549
1019	HDJT61152	1059	HDJT61318	1099	HDJV61018	1139	GBWX60337	1179	PBWX72550
1020	HDJT61156	1060	HDJU66010	1100	HDJV61019	1140	GBWX60339	1180	PBWX72551
1021	HDJT61157	1061	HDJU66015	1101	HDJV61020	1141	GBWX60340	1181	PBWV61499
1022	HDJT61159	1062	HDJU66016	1102	HDJV61021	1142	PBWX72016	1182	PBWV61546
1023	HDJT61165	1063	HDJU66021	1103	HDJV61022	1143	PBWX72017	1183	PBWV61497
1024	HDJT61178	1064	HDJU66166	1104	HDJV61023	1144	PBWX72018	1184	PBWY70948
1025	HDJT61180	1065	HDJU66169	1105	HDJV61024	1145	PBWX72019	1185	PBWY71022
1026	HDJT61160	1066	HDJV60245	1106	PBWV60587	1146	PBWX72020	1186	PBWY71027
1027	HDJT61162	1067	HDJV60254	1107	PBWV60588	1147	PBWX72021	1187	PBWY70961
1028	HDJT61164	1068	HDJV60260	1108	PBWV60589	1148	PBWX72022	1188	PBWY70951
1029	HDJT61167	1069	HDJV60225	1109	PBWV60590	1149	PBWX72023	1189	PBWY70965
1030	HDJT61170	1070	HDJV60227	1110	PBWV60591	1150	PBWX72025	1190	PBWY70960
1031	HDJT61174	1071	HDJV60228	1111	PBWV60592	1151	PBWX72027	1191	PBWY70956
1032	HDJT61175	1072	HDJV60229	1112	PBWV60593	1152	PBWX72028	1192	PBWY71034
1033	HDJT61234	1073	HDJV60230	1113	PBWV60594	1153	PBWX72029	1193	PBWY71023
1034	HDJT61236	1074	HDJV60231	1114	PBWV60595	1154	PBWX72031	1194	PBWY70958
1035	HDJT61149	1075	HDJV60232	1115	PBWV60596	1155	PBWX72033	1195	PBWY71047
1036	HDJT61153	1076	HDJV60233	1116	GBWV60475	1156	PBWX72034	1196	PBWY71029
1037	HDJT61158	1077	HDJV60448	1117	HDJR58217	1157	PBWX72035	1197	PBWY71030
1038	HDJT61166	1078	HDJV60449	1118	HDJR58218	1158	PBWX72036	1198	PBWY71031
1039	HDJT61172	1079	HDJV60450	1119	HDJR58219	1159	PBWX72037	1199	PBWY70950
1040	HDJT61173	1080	HDJV60451	1120	HDJR58220	1160	PBWX72038	1200	PBWY71033

附表 2 识别信息 (续)

#	序列号
1201	PBWY70949
1202	PBWY71024
1203	PBWY71040
1204	PBWY70962
1205	PBWY70964
1206	PBWY71035
1207	PBWY70955
1208	PBWY71041
1209	PBWY71032
1210	PBWY70957
1211	PBWY71025
1212	PBWY70963
1213	PBWY70967
1214	PBWY71046
1215	PBWY71043
1216	PBWY71036
1217	PBWY70954
1218	PBWY70953
1219	PBWY70952
1220	PBWY70966
1221	PBWY71039
1222	PBWY71045
1223	PBWY70959
1224	PBWY71037
1225	PBWY71042
1226	PBWY71038
1227	PBWY71028
1228	PBWY71044
1229	PBWY71026
1230	GBWY70158
1231	GBWY70157
1232	GBWY70165
1233	GBWY70160
1234	GBWY70162
1235	GBWY70164
1236	GBWY70159
1237	GBWY70161
1238	GBWY70163
1239	GBWY70166

